


一、止汗装置摆放配置



1.1 请将多功能箱如上图平放，放入毛巾。



1.2 如上图将导线插针插入电极孔，并将黑色面朝上放进多功能箱两个盘子，用毛巾盖上。

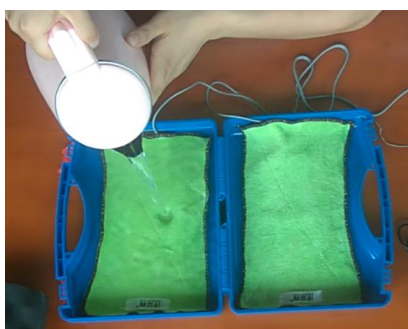

1.3 如上图向多功能箱加自来水（冬天可以将自来水加热变温后使用），水没过毛巾即可。

将电源适配器插入主机输入口，插入插座接通电源。

1.4 同理可以应用到增强版手足止汗套装：



1.4.1 将特制不锈钢板放到多功能箱中，塑料网格放在不锈钢板上用来避免手足直接接触电极版。

1.4.2 将鳄鱼夹夹到特制不锈钢板上，请注意不锈钢连接线等设置好APP后再插入主机的输出口。

1.4.3 向多能箱中加入水，将电源适配器插入主机输入口，插入插座接通电源。

二、安装APP

（如果已经下载安装过APP请直接到步骤五）用户扫描右图二维码（建议用带扫描功能的手机浏览器扫描），下载相应的苹果iOS或者安卓Android的汗立克APP应用：



三、运行汗立克APP

点击如右图所示汗立克APP图标即运行APP。

四、用户注册

用户通过手机号以及手机验证码注册。



五、登录APP

注册登录后，进入汗立克APP首页（如图三所示），点击控制器进入控制器界面，如图四所示：



图一 汗立克APP首页



图二 控制器界面

六、开启主机

请将电源适配器接通电源，**长按PDB-100主机右上角电源开关3秒钟，主机打开，此时蓝牙指示灯闪烁，指示机器打开。**

七、APP连接主机

在APP控制器中，进入控制器界面。点击“连接蓝牙”，显示“连接中”，连通蓝牙后提示“蓝牙已连接”且蓝牙指示灯常亮、“开始止汗”，然后点击手或者足模式，如右图：备注：蓝牙设备ID为：HC-08。

选中手或者足模式之后，仍然可通过手动继续微调、修改止汗密度、电压、倒计时等参数，**首次使用建议将电压调至15或者更低的电压，手足皮肤适应3-5分钟后再自行往上增加。**



图三 背部模式

八、开始止汗



图四 双手止汗

参数设置完毕之后，**将连通手足止汗装置的导线插入主机输出口**，主机检测到有皮肤添加上之后，“开始止汗”指示灯变为常亮，开始止汗。此时，输出电压将以大约每秒1伏特的间隔逐渐增加至设定值。用户在此期间将感受一个非常舒适的电流增强变化。

在此止汗期间，用户可以将手足从手足止汗装置脱离。当皮肤离开止汗装置的一刹那，偶尔会感觉有轻微的电流变化，这个变化没有什么影响，之后“开始止汗”指示灯灭掉变为灰色，同时倒计时暂停。**备注：当手足从止汗装置脱离时，建议将输出电压值调节为0。**



图五 双脚止汗

当用户再次将手足放入止汗装置并连通导线至主机输出孔后，“开始止汗”指示灯将变为常亮。

当累计时间从1变为0时，输出电压开始逐步以大约每秒1伏特的速度逐步下降，直至最终下降为0。然后，系统弹出一个提示窗口如图7所示：“此次操作结束，请务必关闭主机电源，再次使用请重新上电并连接蓝牙。”轻按主机开关一下，即关闭主机电源，这样就结束一个基本的止汗操作。下次止汗则重复从上述步骤一开始。



图六 控制器界面

九、开启语音模式（可选）

当蓝牙连接后，用户可以随时开启语音模式，该模式尤其对于双手止汗时提供最大便利，方便用户在对双手止汗时，不需要用手修改止汗参数，从而节省止汗时间、提高止汗效率，省却多次将手离开、再次浸入止汗水盘的麻烦。当左上角出现“开始录音”时，可使用以下说明书中表格1中语音指令进行操作。

世界首款 专利保护